



Adapter for LX Hoved

Vejledning



Designet af den nye serie af øjenstyret Tobii i13/i16, hvor UDS (Universal device sockets fra Rehadapt) er fast monteret, har gjort det nødvendigt at ombygge de Jysk Handi produkter som har et LX Hoved.

Vejledningen gælder for følgende produkter fra Jysk Handi:

Vare nr.:	HMI	Produkt
330000	72215	Mobilstander
660010	72178	LX Arm bordmodel
661002	82238	LX Hoved for Daessy montering med USB

Ombygningen kan ske på flere måder, først monteres der en ny adapter på det eksisterende LX Hoved, herefter kan følgende løsninger vælges.

Løsning 1: Rehadapt

Der monteres en ny Rehadapt UDS-GP på den nye adapter.

Løsning 2: Daessy

Der monteres en ny Daessy MUSB på den nye adapter, samtidig skal der fast monteres en Daessy adapter på Tobii'en.



Adapter for LX Hoved



Vejledning

Løsning 1: Rehadapt – Komponenter til ombygning af LX Hoved



Vare nr.: 661086

Adapter for LX Hoved til MUSB og UDS-GP

Incl. skruer og vejledning til montering.

2 stk. Cylinderskruer M6x 25



Vare nr.: 661084

UDS-GP for LX Hoved

Boret for LX så der kan sættes en unbraco nøgle i og friktion på LX hoved kan justeres.

3 stk. Maskinskrue us. El.galv M4x20 Tx20



Adapter for LX Hoved



Vejledning

Løsning 2: Daessy – Komponenter til ombygning af LX Hoved



Vare nr.: 661086

Adapter for LX Hoved til MUSB og UDS-GP

Incl. skruer og vejledning til montering.

2 stk. Cylinderskruer M6x 25



Vare nr.: 661082

MUSB for LX Hoved

Boret for LX så der kan anvendes en unbraco nøgle til justering af friktion i LX Hoved.

2 stk. Maskinskruer us. El.galv M5x30 Tx20



Vare nr.: 608810

Mount CNCT to Daessy Conversion Plate

Daessy adapter for Tobii i13/i16

Designet til fast montering bag på Tobii så den passer til Daessy.





Adapter for LX Hoved

Vejledning

1. Afmontering af eksisterende Daessy USB



De 2 stk. M6 skruer løsnes.
Eksisterende Daessy USB afmonteres.

2. Montering af ny Adapter for LX Hoved til MUSB og UDS-GP



Den nye adapter monteres med 2 stk. M6x25 skruer.

3. Montering af Løsning 1: Rehadapt - UDS-GP for LX Hoved



Den nye Rehadapt UDS-GP for LX Hoved monteres med de 3 stk. M4x20 skruer som medfølger.

4. Montering af Løsning 2: Daessy - MUSB for LX Hoved



Den nye Daessy MUSB for LX Hoved monteres med afstandsplade og de 2 stk. M5x30 skruer der medfølger.





Adapter for LX Hoved

Vejledning

Adapter fra Rehadapt til Daessy



Vare nr.: 661082

Adapter fra Rehadapt til Daessy

Standard adapter fra Rehadapt.

Adapter fra Daessy til Rehadapt

--- Under udvikling ---



Vare nr.: 601425

Adapter fra Daessy til Rehadapt

Under udvikling...



Jysk Handi
2019-12

